



# БЕЗПЕЧНА ІV КАНЮЛЯ З РТФЕ/РЕР/РІМЕХ КАТЕТЕРОМ


## ІV КАНЮЛЯ З ТРИМАЧЕМ І КРИЛЬЦЯМИ ІV

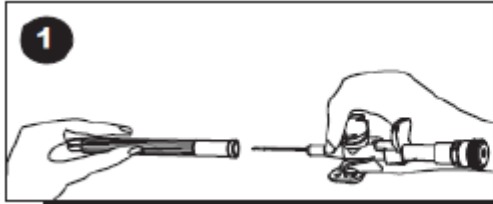

1. Зніміть ковпачок канюлі.

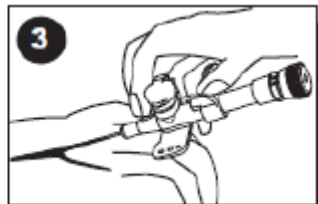


3. Вставте канюлю під невеликим кутом у вену.

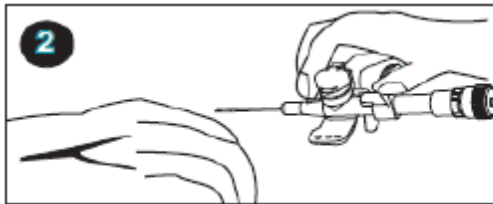

2. Канюлю захопіть за утримувач голки.



4. Акуратно витягніть голку.

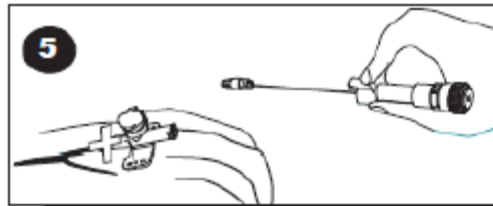


5. Вістря голки закрийте запобіжним ковпачком.




6. Голку ліквідуйте, помістивши її в контейнер для гострих предметів


## КАНЮЛЯ БЕЗ ТРИМАЧА І КРИЛЕЦЬ

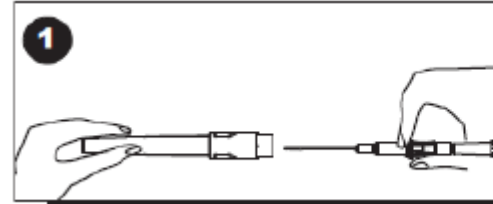


1. Зніміть ковпачок канюлі.

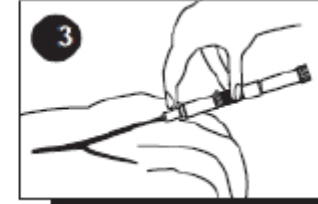


3. Вставте канюлю під невеликим кутом у вену.

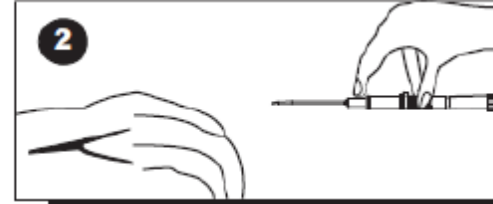

2. Тримайте канюлю скошеною стороною вгору.

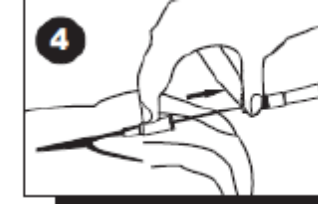

4. Акуратно витягніть голку.

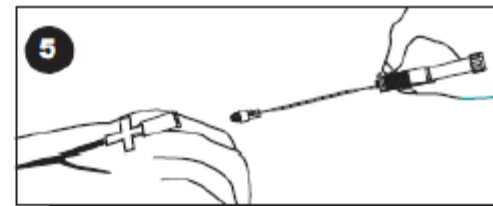

5. Вістря голки закрийте запобіжним ковпачком.



6. Голку ліквідуйте, помістивши її в контейнер для гострих предметів



Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:  
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»  
79057, Україна, м.Львів, вул. Антоновича, 128  
Тел./факс: +38 (032) 244-244-0 www.medservis.com.ua



**«CHIRANA T. Injecta, a.s.»**  
Площа Д-ра Швейцера, 194  
916 01 Стара Тура  
Словацька республіка  
Тел.: +421 / 32/7709 991  
Факс: +421/32/7709 956  
[www.t-injecta.com](http://www.t-injecta.com)

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

### БЕЗПЕЧНА I.V. Канюля з PTFE / FEP / PUMEX катетер

ВИКОРИСТАНИ МАТЕРІАЛИ: PTFE або FEP або ж PUMEX, поліпропілен, поліетилен, поліоксиметилен, силіконова гума і нержавіюча сталь.

**ПОКАЗАННЯ:**

- Введення рідин, таких як розчини, паренатальне харчування, а також введення інших лікарських препаратів.
- Підтримання гідратації або ж правильна гідратація пацієнтів, які не здатні приймати достатню кількість рідини через рот.
- Переливання крові або ж компонентів крові.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:**

- Введення високов'язких рідин.
- Великі трансфузії крові.
- Не використовувати для пацієнтів з відомою надчутливістю на будь-який з використаних матеріалів.
- Введення дратівливих рідин, або ж лікарських препаратів.



### БЕЗПЕЧНА IV КАНЮЛЯ - ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Виберіть правильний розмір IV канюлі. Для введення необхідних IV рідин завжди вибирайте найменш можливий розмір канюлі.
2. Обережно виберіть і продезінфікуйте місце проколювання вени.
3. Перевірте цілісність упаковки канюлі і термін її придатності, після чого вийміть канюлю з упаковки.
4. Зніміть ковпачок з голки, потім візьміться за утримувач кріплення голки.
5. Введіть канюлю під невеликим кутом нахилу в вену і переконайтеся у правильності проколювання голкою по крові в проточній камері.
6. Вводите катетер у вену, одночасно витягуючи голку швидким і плавним рухом, паралельним поверхні шкіри. Дуже важливе застереження: під час вилучення голки її не можна повертати (ні вправо, ні вліво).
7. Пасивний запобіжний ковпачок вістря голки автоматично закриє скіс голки.
8. Не торкайтеся запобіжного ковпачка вістря голки голими руками.
9. Голку відразу ж ліквідуйте, помістивши її в контейнер для гострих предметів.
10. Частково або ж повністю витягнуту голку не намагайтеся вставляти повторно.
11. Можливе витікання крові попередьте, натиснувши великим пальцем на вену в місці або ж над місцем вістря катетера.
12. Голку замініть або IV трубкою інфузійної системи, або пробкою luer-lock.
13. Крильця канюлі прикріпіть клейкою стрічкою до поверхні шкіри пацієнта.
14. Місце проколу прикрийте стерильною пов'язкою.
15. Лікарські препарати можуть вводитися періодично за допомогою шприца через ін'єкційне отвір після зняття кришки.
16. Коли ін'єкційний отвір не використовується, кришка повинна завжди стояти.
17. Регулярно контролюйте місце проколювання вени, а також перевіряйте всі з'єднання.

**ЗАУВАЖЕННЯ:** Пункти № 13, 15 і 16 поширюються тільки на IV канюлі з утримувачем і крильцями.



### Попередження

- До початку роботи прочитайте дану інструкцію.
- Даний продукт може застосовувати тільки кваліфікований лікар або медичний працівник.
- Перед використанням даного продукту перевірте цілісність упаковки і термін зберігання.
- Даний продукт є стерильним, апірогенним і нетоксичним у разі, якщо упаковки не була передчасно розкрита або пошкоджена.
- Тільки для одноразового використання. Після використання ліквідуйте. Не утилізуйте, не мийте, а також не стерилізуйте повторно.
- Даний продукт використовуйте відразу ж після відкриття окремої блістер - упаковки.
- Зберігайте в холодному і сухому місці. Захищайте від надмірного тепла і попадання прямого сонячного світла.
- Даний продукт повинен використовуватися у відповідності з інструкцією по використанню.
- Даний продукт не повинен бути використаний для хіміотерапії.



Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:  
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»  
79057, Україна, м. Львів, вул. Антоновича, 128  
Тел./факс: +38 (032) 244-244-0 [www.medservis.com.ua](http://www.medservis.com.ua)

CHIRANA T.Injecta, a.s. НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ, СПРИЧИНЕНІ НЕПРАВИЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБУ.



Увага



Див інструкцію з використання

REF:

Етал. № виробу / № позиції



Тільки одноразове використання

LOT

серійний номер



Дата виготовлення



Використати до / Строк придатності

STERILE EO

Стерилізовано етиленоксидом



Виробник



Виріб не містить латекс




Виріб не містить DEHP



Не використовувати, якщо штучна упаковка пошкоджена



Не залишайте на сонці

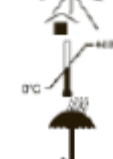

Температурні обмеження

Не залишайте під дощем



«CHIRANA T. Injecta, a.s.»  
Площа Д-ра Швейтцера, 194  
916 01 Стара Тура  
Словацька республіка  
Тел.: +421 / 32/7709 991  
Факс: +421/32/7709 956  
[www.t-injecta.com](http://www.t-injecta.com)