

CHIRAFLEX

Mandrin – Luer Lock

Рекомендований спосіб застосування STYLET (Обтуратор, Мандрена) одноразового використання



Опис: Обтуратор одноразового використання. Стерильний, нетоксичний, апірогенний.
Склад: Обтуратор.
Область застосування: Для підтримки інтраваскулярних канюль в закритому стані тривалий час.
Заборона: Не використовувати для пацієнтів з відомою гіперчутливістю на будь-який з використовуваних матеріалів.



1. Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
2. Продукти повинні бути використані відразу ж після відкриття упаковки і повинні стати недоступними для подальшого застосування після використання;
3. Застосовувати продукт має право тільки кваліфікований лікар або медичний працівник;
4. Тільки для одноразового використання. Після одного використання комплект ліквідуєте;
5. Дане пристосування не містить фталати DEHP;
6. Повторна стерилізація або ж повторне використання можуть викликати інфекцію або ж взаємну перехресну дію.



1. Виберіть правильний тип обтуратора відповідно до розміру інтраваскулярної канюлі;
2. Перевірте цілісність упаковки і термін придатності, після чого вийміть обтуратор з упаковки;
3. Акуратно зніміть запобіжний ковпачок інтраваскулярної канюлі і вставте обтуратор через катетер. Щільно заштотхніть обтуратор в інтраваскулярний катетер;
4. Перед введенням ліків або лікарського препарату обтуратор вийміть.



Увага



Див. інструкцію з використання

REF:

Етал. № виробу / № позиції



Одноразового використання



Серійний номер



Дата виготовлення



Використати до / Строк придатності



Стерилізовано етиленоксидом



Виробник



Виріб не містить DEHP



Виріб не містить латекс



Не застосовувати, якщо штучна упаковка пошкоджена



Не залишайте на сонці



Температурні обмеження



Не залишайте під дощем



«CHIRANA T. Injecta, a.s.»

Площа Д-ра Швейтцера, 194

916 01 Стара Тура

Словацька республіка

Тел.: +421 / 32/7709 991

Факс: +421/32/7709 956

www.t-injecta.com



Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
79057, Україна, м.Львів, вул. Антоновича, 128
тел./факс: +38 (032) 244-244-0 www.medservis.com.ua