

CHIRANEM

Інструкція з використання Системи для переливання крові одноразового використання



20 КРАПЕЛЬ = 1мл ± 0,1 мл (1г ± 0,1 г)
Фільтр 200 μм

Містить або ж в ній присутні фталати:
Біс-(2-етилгексил) фталат (DEHP)



Опис: Система для переливання крові одноразового використання. Стерильна, нетоксична, апірогенна.

Склад: Вироби складаються з кришки пристосування для проколівання пробки, пристосування для проколівання пробки, трубки, крапельної камери, крапельної трубки, фільтра крові, регулятора потоку і т.д. Є різні розміри голок.

Область застосування: Застосовується для переливання крові в клінічних умовах, а також використовується для надання медичної допомоги.

Заборони для застосування: Застосовувати тільки для переливання крові.




1. Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
2. Продукти повинні бути використані відразу ж після відкриття упаковки і повинні стати недоступними для подальшого застосування після використання;
3. Якщо упаковка пошкоджена, відсутня кришка або ж термін дії вже закінчився, використання продукту не дозволяється;
4. Якщо під час трансфузії виникне нестандартна ситуація, необхідно вирішити її відповідно з робочим порядком клініки;
5. Дане пристосування містить фталати DEHP;
6. Довгострокове використання систем для переливання крові, що містять DEHP, у грудних немовлят, дітей або вагітних жінок може підвищити ризик порушення роботи їх ендокринної системи;
7. Повторна стерилізація або ж повторне використання можуть викликати інфекцію або ж взаємну перехресну дію.



1. Закрийте регулятор потоку, зніміть кришку з пристосування для проколівання пробки, вставте пристосування для проколівання пробки в мішок з кров'ю й уникніть можливому її витоку;
2. Пальцем натисніть на крапельну камеру, і дайте можливість камері наполовину наповнитися кров'ю;
3. Відкрийте регулятор потоку, випустіть повітря, поспостерігайте за утворенням крапель і запустіть трансфузію;
4. Перед використанням щільно вставте голку і попередьте можливий витік.



«CHIRANA T. Injecta, a.s.»
Площа Д-ра Швейцера, 194
916 01 Стара Тура
Словацька республіка
Тел.: +421 / 32/7709 991
Факс: +421/32/7709 956
www.t-injecta.com

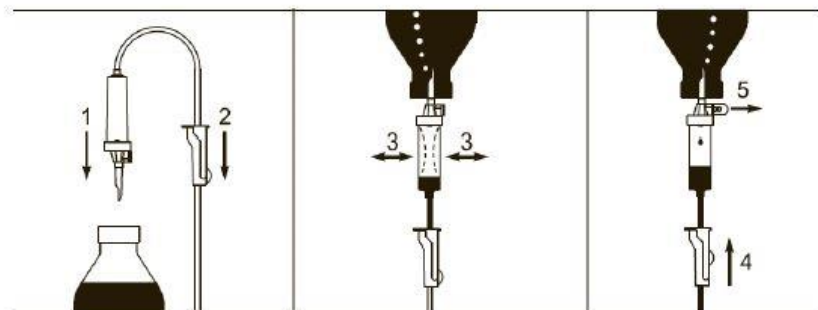

Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
79057, Україна, м. Львів, вул. Антоновича, 128
Тел./факс: +38 (032) 244-244-0 www.medservis.com.ua

UA.TR.114