

Chirana

Рекомендований спосіб застосування інсулінового і туберкулінового шприца одноразового використання



STERILE EO

Опис: Інсулінові шприци одноразового використання. Туберкулінові шприци одноразового використання. Стерильні, нетоксичні, апірогенні.


Область застосування: Для подачі інсуліну або вакцин пацієнтам.



1. Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
2. Продукти повинні бути використані відразу ж після відкриття штучної упаковки і повинні стати недоступними для подальшого застосування після використання;
3. Якщо штучна упаковка пошкоджена або ж термін дії вже закінчився, використання продукту не дозволяється;
4. Застосовувати продукт має право тільки кваліфікований лікар або ж медичний працівник;
5. Тільки для одноразового використання. Після одного використання комплект ліквідуйте;
6. Дане пристосування не містить фталати DEHP;
7. Повторна стерилізація або ж повторне використання можуть викликати інфекцію або ж взаємну перехресну дію.



1. Перед використанням відкрийте штучну упаковку;
2. Перед використанням перевірте цілісність кожної окремої упаковки. Якщо упаковка пошкоджена, не використовуйте її;
3. Кожен використаний шприц вважається зараженим і відразу ж після його використання має бути ліквідований в належний контейнер;
4. Після одного використання ліквідуйте його безпечним способом, щоб попередити інфекцію.

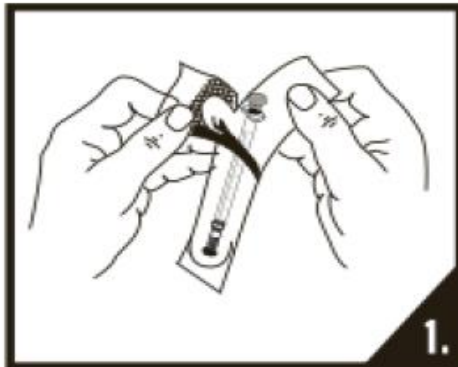

Увага



Див. інструкцію з використання

REF:

Етал. № виробу / № позиції



Тільки одноразове використання

Серійний номер

LOT



Дата виготовлення



Використати до / Термін придатності

STERILE EO

Стерилізовано етиленоксидом



Виріб не містить DEHP



Виріб не містить PVC



Виріб не містить латекс



Не використовувати, якщо штучна упаковка пошкоджена



Не залишайте на сонці



Температурні обмеження



Не залишайте під дощем



«CHIRANA T. Injecta, a.s.»

Площа Д-ра Швейцера, 194

916 01 Стара Тура

Словацька республіка

Тел.: +421 / 32/7709 991

Факс: +421/32/7709 956

www.t-injecta.com



Виробник

ITS 6-04-09/2017 Дата перевірки 18.09.2017



Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»
79057, Україна, м. Львів, вул. Антоновича, 128
Тел./факс: +38 (032) 244-244-0 www.medservis.com.ua