

# MEDOJECT®

## Рекомендації щодо застосування стерильної голки для ін'єкцій MEDOJECT



**Опис :** Стерильна голка для ін'єкцій, одноразового використання. Стерильна, нетоксична, апірогенна.


**Область застосування:** Для ін'єкційного введення лікарських препаратів (підшкірного, внутрішньом'язового, внутрішньовенного), а також для забору фізіологічних рідин у пацієнтів.



1. Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
2. Голки повинні бути використані відразу після відкриття штучної упаковки і повинні стати недоступними для подальшого застосування після використання;
3. Якщо штучна упаковка пошкоджена або ж термін дії вже закінчився, використання продукту не дозволяється;
4. Застосовувати продукт має право тільки кваліфікований лікар, або медичний працівник;
5. Тільки для одноразового використання. Після одного використання голку необхідно утилізувати;
6. Даний виріб не містить фталату DEHP;
7. Повторна стерилізація або ж повторне використання можуть викликати інфекцію або ж взаємну перехресну дію.



1. Перед використанням перевірте цілісність кожної окремої упаковки. Якщо упаковка пошкоджена, не використовуйте її;
2. Перед використанням, відкрийте індивідуальне пакування голки;
3. Кожна використана голка вважається зараженою і відразу після її використання повинна бути ліквідована в належний контейнер;
4. Після одного використання ліквідуйте її безпечним способом, щоб уникнути ризику зараження;
5. Тримайте руки позаду вістря голки протягом усього часу використання та утилізації.

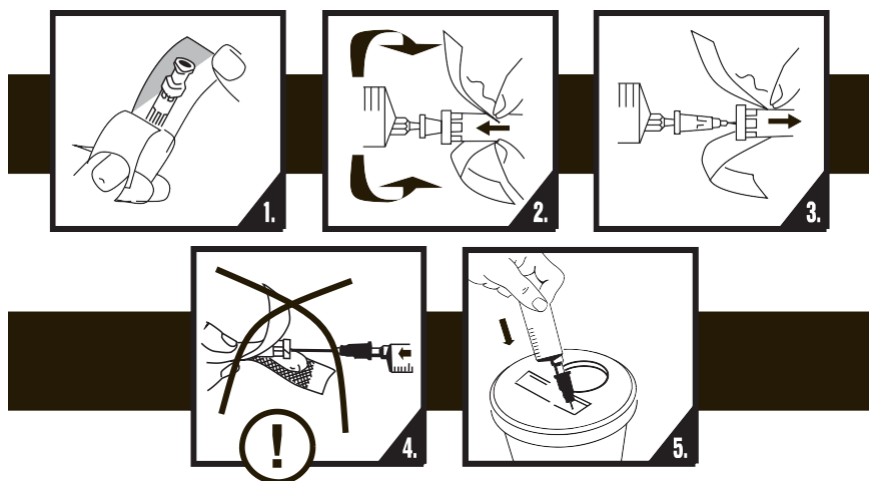

**Засторога!**



Озн. з інструкцією для застосування

REF:

Етал. № виробу / № позиції



Повторно викор. **ЗАБОРОНЕНО**

LOT

Код партії



Дата виготовлення



Використати до / Термін придатності

**STERILE EO**

Стерилізація оксидом етилену



Виробник



Довгий сік



Короткий сік



Не містить DEHP



Не містить PVC



Не містить латекс



Не використовувати, якщо пакування пошкоджено



Апірогенно



Оберігати від дії прямого сонячного проміння



Температурне обмеження



Не залишайте під дощем



CHIRANA T. Injecta, a.s.  
 Nám. Dr. Schweitzera 194  
 916 01 Stará Turá  
 Slovak Republic  
 Tel.: +421/32/7709 991  
 Fax.: +421/32/7709 956  
[www.t-injecta.com](http://www.t-injecta.com)



Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:  
 Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»  
 79057, Україна, м. Львів, вул. Антоновича, 128  
 Тел./факс: +38 (032) 244-244-0 [www.medservis.com.ua](http://www.medservis.com.ua)