

# Chirana

## Рекомендований спосіб застосування інсулінового і туберкулінового шприца одноразового використання



**STERILE EO**

**Опис:** Інсулінові шприци одноразового використання. Туберкулінові шприци одноразового використання. Стерильні, нетоксичні, апірогенні.

**Область застосування:** Для подачі інсуліну або вакцин пацієнтам.



1. Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
2. Продукти повинні бути використані відразу ж після відкриття штучної упаковки і повинні стати недоступними для подальшого застосування після використання;
3. Якщо штучна упаковка пошкоджена або ж термін дії вже закінчився, використання продукту не дозволяється;
4. Застосовувати продукт має право тільки кваліфікований лікар або ж медичний працівник;
5. Тільки для одноразового використання. Після одного використання комплект ліквідуйте;
6. Дане пристосування не містить фталати DEHP;
7. Повторна стерилізація або ж повторне використання можуть викликати інфекцію або ж взаємну перехресну дію.



1. Перед використанням відкрийте штучну упаковку;
2. Перед використанням перевірте цілісність кожної окремої упаковки. Якщо упаковка пошкоджена, не використовуйте її;
3. Кожен використаний шприц вважається зараженим і відразу ж після його використання має бути ліквідований в належний контейнер;
4. Після одного використання ліквідуйте його безпечним способом, щоб попередити інфекцію.



Увага



Див. інструкцію з використання

**REF:**

Етал. № виробу / № позиції



Тільки одноразове використання

Серійний номер

**LOT**



Дата виготовлення



Використати до / Термін придатності

**STERILE EO**

Стерилізовано етиленоксидом



Виріб не містить DEHP



Виріб не містить PVC



Виріб не містить латекс



Не використовувати, якщо штучна упаковка пошкоджена



Не залишайте на сонці

0°C



Температурні обмеження



Не залишайте під дощем



«CHIRANA T. Injecta, a.s.»  
Площа Д-ра Швейцера, 194  
916 01 Стара Тура  
Словацька республіка  
Тел.: +421 / 32/7709 991  
Факс: +421/32/7709 956  
[www.t-injecta.com](http://www.t-injecta.com)

ITS 6-04-09/2017 Дата перевірки 18.09.2017



Виробник



UA.TR.126

Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:  
Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»  
79057, Україна, м. Львів, вул. Антоновича, 128  
Тел./факс: +38 (032) 244-244-0 [www.medservis.com.ua](http://www.medservis.com.ua)