

CHIRANEM

Інструкція із застосування
Системи для переливання крові CHIRANEM з металевою голкою
одноразового використання



20 КРАПЕЛЬ = 1мл ± 0,1 мл (1г ± 0,1 г)
Фільтр 200 μм

Містить або ж в ній присутні фталати:
Біс-(2-етилгексил) фталат (DEHP)



Опис: Система для переливання крові одноразового використання. Стерильна, нетоксична, апірогенна.


Склад: Вироби складаються з кришки пристосування для проколювання пробки, пристосування для проколювання пробки, трубки, крапельної камери, крапельної трубки, фільтра крові, регулятора потоку і т.д. Може комплектуватися різними розмірами голок.

Область застосування: Застосовується для переливання крові в клінічних умовах, а також використовується для надання медичної допомоги.

Заборони для застосування: Застосовувати тільки для переливання крові.



1. Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
2. Продукти повинні бути використані відразу ж після відкриття упаковки і повинні стати недоступними для подальшого застосування після використання;
3. Якщо упаковка пошкоджена, відсутня кришка або ж термін дії вже закінчився, використання продукту не дозволяється;
4. Якщо під час трансфузії виникне нестандартна ситуація, необхідно вирішити її відповідно з робочим порядком клініки;
5. Дане пристосування містить фталати DEHP;
6. Довгострокове використання систем для переливання крові, що містять DEHP, у грудних немовлят, дітей або вагітних жінок може підвищити ризик порушення роботи їх ендокринної системи;
7. Повторна стерилізація або ж повторне використання можуть викликати інфекцію або ж взаємну перехресну дію.

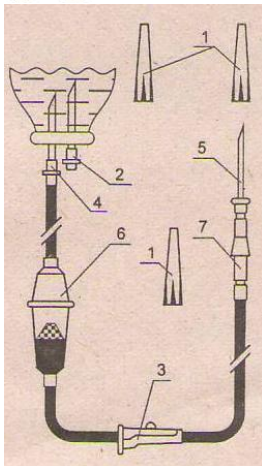

Порядок застосування

1. Перевірте придатність трансфузійного середовища до застосування.
2. Обробіть місце введення голки в ємність (пляшку або контейнер) антисептиком.
3. Перевірте цілісність споживчої тари та термін придатності пристрою.
4. Відкрийте споживчу тару і вийміть пристрій.
5. Закрийте затискач 3, зніміть ковпачок 1 з голки 4 і введіть голку 4 в ємність (в корок пляшки на 2/3 довжини).
6. Закріпіть ємність на штативі та заповніть крапельницю 6 до занурення фільтра в рідину, періодично натискаючи на нижню частину її корпусу.
7. Зніміть ковпачок з голки ін'єкційної 5. Відкрийте повільно затискач. Заповніть рідиною трубку пристрою, при цьому голка повинна знаходитись на рівні крапельниці 6.
8. Закрийте затискач. Вдягніть ковпачок 1 на голку ін'єкційну 5.
9. При переливанні із пляшки введіть голку повітроводу 2 в пробку пляшки до упору.
10. Зніміть ковпачок 1 з голки ін'єкційної 5, відкрийте затискач 3 і повільно заповнюйте пристрій до повного витіснення повітря і появи краплини з голки ін'єкційної. Закрийте затискач і надіньте ковпачок 1 на голку ін'єкційну 5.
11. Перевірте відсутність бульбашок повітря в трубці пристрою.
12. Обробіть місце венепункції антисептиком і зробіть венепункцію.
13. Відкрийте затискач 3 і відрегулюйте швидкість вливання. 20 крапель дистильованої води відповідають (1,0±0,1)г.
14. Вводьте додаткові медикаменти лише через ін'єкційний вузол 7, застосовуючи голки діаметром не більше 0,8мм при закритому затискачу.
15. При заміні ємкості закрийте затискач 3, не витягуючи ін'єкційну голку 5 з вени і не допускаючи опорожнення крапельниці, витягніть голку 4 і 2 з порожньої пляшки і швидко введіть в наповнену ємність спочатку голку 4, а потім голку 2.



«CHIRANA T. Injecta, a.s.»
Площа Д-ра Швейтцера, 194
916 01 Стара Тура
Словацька республіка
Тел.: +421 / 32/7709 991
Факс: +421/32/7709 956
www.t-injecta.com



UA.TR.126

Уповноважений представник в Україні / служба споживачів:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕРКУРІЙ ВЕСТ»

79057, Україна, м. Львів, вул. Антоновича, 128

тел./факс: +38 (032) 244-244-0 www.medservis.com.ua

TS 6-02-07/2011 Дата перевірки 08.07.2011