


# Chirana

## Рекомендований спосіб застосування підшкірного шприца одноразового використання

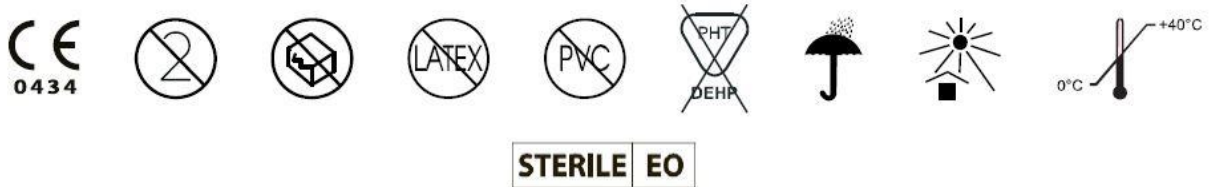


**Опис:** Підшкірні шприци одноразового використання. Стерильні, нетоксичні, апірогенні.  
**Область застосування:** Застосовуються для введення ін'єкцій і крові, а також для забору фізіологічних рідин у пацієнтів. Для режимів FNA і FNNA рекомендуємо використовувати 3-х компонентні шприци CHIRANA.



- Перед використанням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, серійний номер і термін придатності;
- Продукти повинні бути використані відразу ж після відкриття штучної упаковки і повинні стати недоступними для подальшого застосування після використання;
- Якщо штучна упаковка пошкоджена або ж термін дії вже закінчився, використання продукту не дозволяється;
- Застосовувати продукт має право тільки кваліфікований лікар або ж медичний працівник;
- Тільки для одноразового використання. Після одного використання комплект ліквідуйте;
- Дане пристосування не містить фталати DEHP;
- Повторна стерилізація або ж повторне використання можуть викликати інфекцію або ж взаємну перехресну дію.



- Перед використанням відкрийте штучну упаковку;
- Перед використанням перевірте цілісність кожної окремої упаковки. Якщо упаковка пошкоджена, не використовуйте її;
- Кожен використаний шприц вважається зараженим і відразу ж після його використання має бути ліквідований в належний контейнер;
- Після одного використання ліквідуйте його безпечним способом, щоб попередити інфекцію.

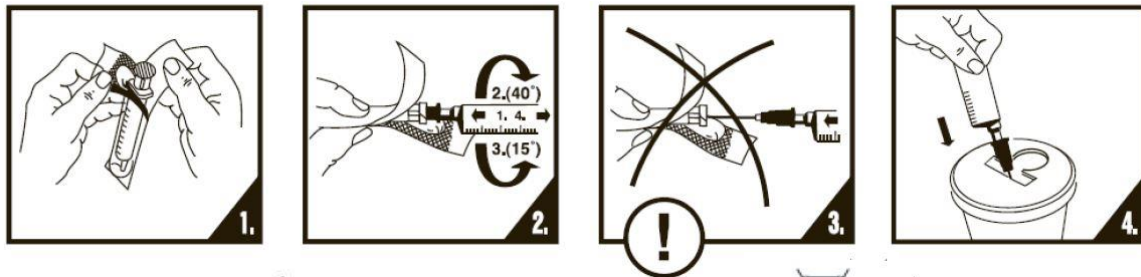

Увага



Див. інструкцію з використання

**CODE:**

Етал. № виробу / № позиції



Тільки одноразове використання

**LOT**

Серійний номер



Дата виготовлення



Використати до / Термін придатності

**STERILE EO**

Стерилізовано етиленоксидом



Виріб не містить DEHP



Виріб не містить PVC



Виріб не містить латекс



Не використовувати, якщо штучна упаковка пошкоджена



Не залишайте на сонці



Температурні обмеження



Не залишайте під дощем



Виробник

HS 6-06-12/2017 Дата перевірки 04.12.2017



UA.TR.126